




## F 451-452

Il filtro per il monocromatismo dei coni blu.

Le lenti con filtri speciali blu F 451 ed F 452 effettuano un assorbimento selettivo. Sono state sviluppate specificamente per pazienti con monocromatismo dei coni blu. Hanno una trasmissione inferiore al 20% nello spettro della radiazione visibile tra 550 nm e 650 nm.

### 1. Notevole miglioramento dell'acuità nei pazienti con monocromatismo dei coni blu

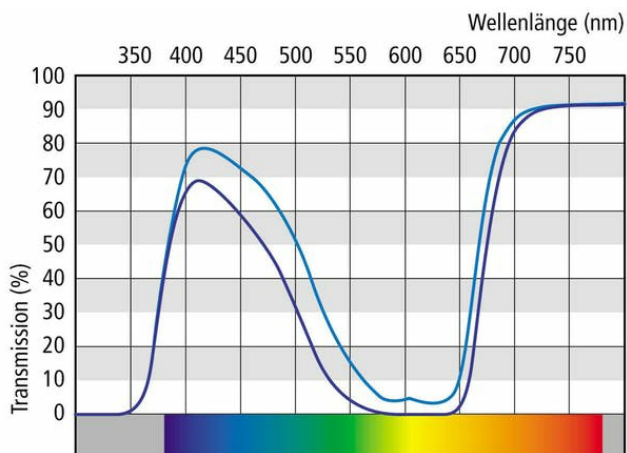

Curve di trasmissione per F 451 ed F 452.

Il monocromatismo dei coni blu è una patologia oculare molto rara in cui rimane solo la funzione dei bastoncelli e dei coni blu.

La lente con filtro blu F 451 e la lente con filtro blu scuro F 452 possono essere utilizzate per conseguire un notevole miglioramento della sensibilità al contrasto, della acuità visiva in generale e al crepuscolo.



### Filtro a clip con lenti con filtri speciali

Il filtro a clip on è montato con filtri speciali neutri. Possono essere applicate senza difficoltà praticamente su qualsiasi montatura.

Il filtro a clip on può essere utilizzato come un supplemento degli occhiali esistenti, sono facili da utilizzare e consentono un rapido cambio del filtro se si devono utilizzare diversi colori. Se non è necessaria, il clip on può essere ribaltata in alto grazie ad un meccanismo a molla posizionato nel supporto sul ponte.

## 2. Categorie di filtri per F 451/452

Tipo di lente	Categoria secondo norma DIN EN ISO 8980-3	Assorbimento UV solare	Adeguatezza alla guida, alla guida notturna ed al crepuscolo, come da norma DIN EN ISO 14889
<b>F 451</b>	Categoria 2	Assorbimento del 100% dei raggi UV-B solari	Non adatte all'utilizzo per la guida!
<b>F 452</b>	(57-82%)	Assorbimento >95% dei raggi UV-A solari	

### Suggerimenti per l'Ottico-Optometrista

- ✓ Trattamenti F 451 e F 452 sono realizzabili unicamente in indice 1.50
- ✓ E' possibile abbinare il trattamento Duravision Platinum

ZEISS è uno dei principali produttori al mondo di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare massima precisione e massimo comfort.



#### Contattateci per maggiori informazioni

Assistenza Clienti ZEISS

☎ 199 -11. 55. 00

✉ Email





---

**Esplora**

Comprendere la visione  
Salute + prevenzione  
Lifestyle + Fashion  
Guida + mobilità  
Sport + tempo libero  
Lavoro

**Aiutami a scegliere**

Occhiali da lontano + da lettura  
Lenti multifocali  
Occhiali da sole  
Occhiali da lavoro  
Occhiali sportivi  
Occhiali per bambini  
Trattamenti per le lenti  
Lenti a contatto  
Pulizia delle lenti  
Presso l'ottico

**Servizi**

Check up visivo online

**ZEISS per l'Ottico Optometrista e il Medico Oculista**

Strumenti + tecnologie  
ZEISS, Lenti per occhiali  
Soluzioni per la pulizia delle lenti ZEISS